

# soft air<sup>®</sup> simplex wds

Réf. 110 470-wds

Prévention et traitement des escarres jusqu'au Stade 2  
(risque faible à moyen)


- |         |  |
|---------|--|
| Matelas | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur matelas</li> <li>▪ Housse de matelas intégrale en PU de haute qualité</li> <li>▪ 21 cellules amovibles individuellement</li> <li>▪ Fonction CPR (réanimation cardio-pulmonaire)</li> <li>▪ Poids du patient de 40 à 130 kg</li> </ul> |
| Pompe   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deux fonctions «Statique ou Alternée»</li> <li>▪ Modules de deux cellules à pression alternée (1/2),<br/>(1 cellule dégonflée - 1 gonflée en alternance)</li> <li>▪ Réglage de la pression suivant le poids du patient</li> </ul>         |



ADL<sup>®</sup> GmbH  
An der Germania Brauerei 1  
48159 Münster  
Germany  
Telefon: +49 (0) 251 149896-0  
Telefax: +49 (0) 251 92260688

ADL<sup>®</sup> GmbH  
Produktionsstätte  
und Servicecenter  
Im Flürchen 1  
99334 Amt Wachsenburg  
Germany  
Telefon: +49 (0) 36202 7519-0  
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: [info@adl-gmbh.de](mailto:info@adl-gmbh.de)  
Internet: [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de)

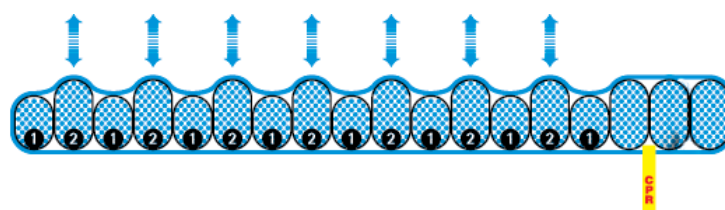

# soft air<sup>®</sup> simplex wds

est un support d'aide à la prévention et au traitement des escarres de **Stade 2** (risques faible à moyen) pour les patients de 40 à 130 kg.

Le **Soft Air<sup>®</sup> Simplex wds** se compose d'une pompe avec le choix de la fonction Statique ou Alterné et d'un sur matelas de 21 cellules en PVC amovibles individuellement, recouvert d'une housse intégrale en PU de haute qualité, respirante, imperméable à l'humidité et lavable à 95 °C. Le matelas se fixe sur un matelas en mousse de 5 cm (type Bantou 100704) ou sur un matelas standard.

Son fonctionnement est simple. Le mode **Statique** basse pression convient aux patients très sensibles.

Le mode Alternée est une fonction dynamique **stimulant le flux sanguin et diversifiant les points d'appui** avec un cycle constant de 10 minutes. Les cellules épousent naturellement les contours du corps grâce au principe de ventilation alternée par groupe de deux cellules, 1 cellule gonflée pour une dégonflée, créant ainsi un **massage à très faible pression** (voir schéma).

La pression se règle sur la pompe suivant le poids et le confort du patient et se règle pour maintenir la pression définie.

La fonction **CPR** (réanimation cardio-pulmonaire) permet de vider rapidement l'air des cellules. Le matelas se désinfecte par autoclave et il est à nouveau opérationnel.

Il est impératif de vérifier la position du patient avec **un contrôle manuel** afin de garantir l'efficacité du support **Soft Air<sup>®</sup> Simplex wds**.

## Articles (lit non inclus)

Réf.	Description
110 470-wds	Soft Air <sup>®</sup> Simplex wds (pompe, matelas à air de 21 cellules et housse en PU)
510 470	Soft Air <sup>®</sup> Simplex wds (matelas avec housse en PU)
110 471-wds	Soft Air <sup>®</sup> Simplex wds (pompe)

## Caractéristiques techniques

	Matelas Soft Air <sup>®</sup> Simplex wds	Pompe Soft Air <sup>®</sup> Simplex wds	Housse
Matériau	PVC	ABS	Polyuréthane
Dimensions en cm	196 x 88 x 12,5	30 x 12 x 10	196 x 88 x 12,5
Poids en kg	~ 4,5	~ 1,5	~ 0,9
Garantie	Deux ans	Deux ans	--
Valeurs de raccordement électrique	--	220 – 240 V 50 – 60 Hz / 7 W	--
Nettoyage	Désinfection autoclave	Désinfection avec un chiffon	Lavable à 95 °C
Domaines d'application	Prévention et traitement des escarres jusqu'au stade 2 (risque faible à moyen)		

